

AEROTEC TLSO

Orteza piersiowo lędźwiowo krzyżowa

Ref. SRT 131

Zalecenia

Zaleca się stosowanie pasa w chorobach degeneracyjnych struktur kręgosłupa, w zespołach bólowych i niestabilności kręgosłupa (również wielopoziomowych), w przypadkach osłabienia napięcia mięśniowego, po zabiegach operacyjnych, w przebiegu osteoporozy (profilaktyka złamań i po przebytych urazach trzonów kręgów, w sytuacjach wymagających stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego

Opis

Gorset wykonany jest ze sztywnego materiału, przepuszczalnego dla ciepła oraz wilgoci i zawiera:

- 2 zintegrowane tworzywowe sztywniki stabilizujące kręgosłup lędźwiowy.
- 2 tworzywowe stalki stabilizujące część brzuszną tułowia, zapobiegające zaginaniu i zwijaniu się części brzusznej gorsetu.
- 4 długie, tworzywowe stalki stabilizujące, przebiegają przykręgosłupowo na odcinku Th-S.
- 2 elastyczne taśmy taliowe o szerokości 5,5 cm zapewniające stabilizację i kompresję kręgosłupa lędźwiowego.
- 2 taśmy barkowe o szerokości 5,5 cm, odpowiedzialne za stabilizację i korektę odcinka piersiowego i obręczy barkowej. Taśmy są osłonięte, pod pachami, pochwami zapobiegającymi powstawaniu otarć i podrażnień skóry.

Szerokość gorsetu z przodu - 16 cm, wysokość z tyłu od 53 do 55,5 cm w zależności od rozmiaru.

Zapięcie i regulacja na velcro. W celu ułatwienia zapinania gorset posiada dodatkowe taśmy uchwytowe. Stalki zapewniają bierną stabilizację i skorygowanie ustawienia na odcinku Th-S. Sam pas główny i system taśm dociągowo-stabilizacyjnych wzmacniają dynamiczny efekt stabilizacyjny gorsetu. Konstrukcja zapewnia redukcję nadmiernej kyfozy i lordozy, normalizację napięcia mięśniowego oraz ustawienia względem siebie struktur anatomicznych kręgosłupa, a co za tym idzie zmniejszenie dolegliwości bólowych. Należy pamiętać, że miejsce dopięcia taśm barkowych wpływa na siłę korekcji odcinka piersiowego i obręczy barkowej (Standard – przejście nad barkami, pod pachami, skrzyżowanie na plecach i dopięcie na nadbrzuszu).

Materiały konstrukcyjne


Gorset wykonany jest z trzywarstwowego laminowanego materiału:

- **Spazio** – przestrzenna siatka 3D o charakterystycznym kształcie, takim jak struktura plastra miodu z poliesterową nicią. Dzięki takiemu rozwiązaniu materiał gorsetu zapewnia przepuszczalność w obu kierunkach dla ciepła i wilgoci.
- **Moltopren (MTP)** - otwartokomórkowy materiał piankowy, przepuszczający powietrze w obu kierunkach, (przepuszczalność jest odwrotnie proporcjonalna do gęstości) o wysokich właściwościach absorpcyjnych wilgoci.
- **Jersey cottone SOFT** - 100% bawełny lub bawełna ze spandexem – elastanem (dla zwiększenia elastyczności).


SOFT - nazwa wersji wykonanej z materiału oferującego właściwości balsamiczne, które gwarantują delikatność w kontakcie z ciałem i zapobiegają powstawaniu podrażnień skóry.

Właściwości tkaniny

- Trójwarstwowa tkanina laminowana, o specyficznej strukturze zachowuje się jak regulator wilgotności: bawełniana warstwa pochłania wilgoć z powierzchni ciała i przenosi ją w głąb tkaniny i przez piankę PU na zewnątrz.

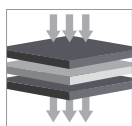

Przepuszczający dla powietrza

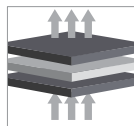

Przepuszczający dla wilgoci


NFZ:

L.03.03 Orteza lędźwiowo- krzyżowo-piersiowa, ze stawkami lub fiszbinami typu sznurówka z systemem mocowań wokół ramion zapewniająca odciążenie niepełne


Dostępne rozmiary

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód talii / brzucha (cm)	65-75	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125
Wysokość części grzbietowej (cm)	53	53	54	54	55,5	55,5
Ref.	SRT131M1	SRT131M2	SRT131M3	SRT131M4	SRT131M5	SRT131M6


Mierzmy obwód talii / brzucha.

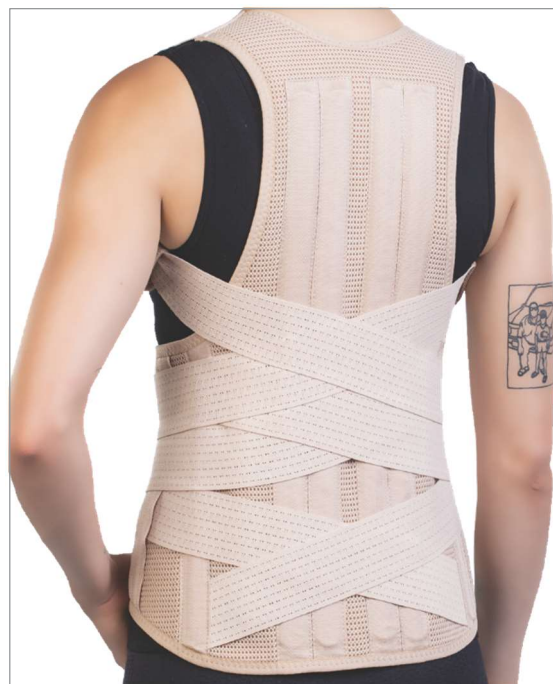

- Taśmy z pochwami ochronnymi – brak otarć.

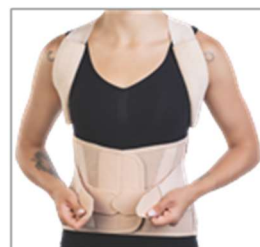

- Zapięcie i regulacja na velcro z przodu – kontrolowana kompresja.

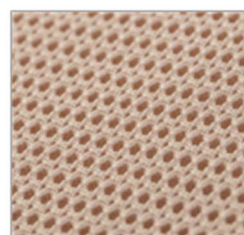

- Nowoczesne materiały o strukturze 3D.

