

TRIAMED

Orteza barku ramienia łokcia nadgarstka i ręki (typ Desault)

Ref. SRT 219

Zalecenia

Zaleca się stosowanie ortezy w sytuacji koniecznego unieruchomienia kończyny górnej, przedramienia, ramienia w rotacji wewnętrznej z przywiedzeniem, przy złamaniach w obrębie szyjki, guzka bez przemieszczenia lub trzonu kości ramiennej oraz zwichnięciach i podwichnięciach stawu barkowego.

Opis

Produkt jest wykonany z dwóch elementów:

- „1” - rękaw utrzymujący przedramię oraz wyposażony w taśmy podtrzymująco-stabilizacyjne zapinane na velcro z możliwością odcięcia nadmiernej długości pasków.
- „2” – stabilizacyjny pas piersiowy, otaczający klatkę piersiową i unieruchamiający ramię względem tułowia. Regulacja długości taśm może odbywać się poprzez odcięcie nadmiaru taśmy i ponowne doczepienie końcówki velcro.

Orteza odciąża i stabilizuje jednostronnie obręcz barkową oraz kończynę górną, w rotacji wewnętrznej ramienia z przywiedzeniem do tułowia.

Materiały konstrukcyjne


Produkt wykonany z trzywarstwowego, laminowanego materiału:

- **Velutino** – to materiał wykonany z włókien poliamidowych wysoce odpornych na chemiczne i biologiczne czynniki, odporny na ścieranie i nie absorbuje wody.
- **Moltopren (MTP)** – to przepuszczalna (w dwóch kierunkach) dla ciepła i wilgoci otwarta komórkowa pianka poliuretanowa, o właściwościach wysokiej wchłaniania wilgoci.
- **Jersey cotton SOFT** – to 100% bawełny lub bawełny ze spandexem – elastanem (w celu zwiększenia elastyczności).


SOFT - nazwa określająca właściwości ochronne bawełny zapewniające miękkość i delikatność w kontakcie ze skórą, co zapobiega powstawaniu podrażnień.

Właściwości tkaniny

Trójwarstwowa tkanina laminowana zachowuje się jak regulator wilgotności: bawełniana warstwa pochłania wilgoć z powierzchni ciała i przenosi ją w głąb tkaniny i przez piankę PU na zewnątrz.

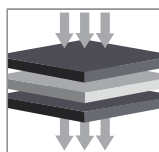

Przepuszczalny dla powietrza

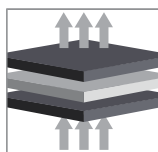

Przepuszczalny dla wilgoci



- 2 taśmy naramienne z możliwą regulacją długości.

- Rękawy ochronne (większy komfort i ochrona skóry).



- Skrzyżowanie taśm naramiennych zabezpiecza przed niekontrolowanym przemieszczaniem.



- Możliwe docięcie taśm (lepsze dopasowanie).

NFZ: J.06.01 Orteza na ramię i bark typu Dessault

Dostępne rozmiary

Produkt uniwersalny